

VarioSurg 3 Handpiece

REKONDITIONERINGSMANUAL

VS3-LED-HPSC



Den här rekonditioneringsmanualen beskriver hur man rekonditionerar VarioSurg 3-handstycket. Läs bruksanvisning för det ultrasoniska systemet noggrant för andra procedurer.

Allmän information

Användare: Kvalificerad personal (tandläkare, munkirurger)

Avsett syfte: Tandvård och munkirurgi (förberedelse av implantatplats, bensnitt, höjning av sinus maxillaris (slemhinnan), osteoplastik, benresektion vid radektomi, periodontal operation, protesunderhåll, kirurgisk endodontisk procedur.



Handstycket bör rengöras, desinficeras och steriliseras omedelbart efter en behandling, och sedan förvaras i enlighet med denna rekonditioneringsmanual.



• Om handstycket inte underhålls enligt nedanstående kan det orsaka infektion, produkthaveri eller överhettning som kan leda till brännskador. • Var alltid noga med att läsa igenom bruksanvisningen noggrant för det ultrasoniska systemet innan det används, så att du har förståelse för instrumentets användning och prestanda.




• Använd endast rengörings- och desinfektionsprodukter som listas i denna manual. • Följ alla ytterligare lokala riktlinjer, standarder och vägledningar för rengöring, desinfektion och sterilisering. • Följ lokala riktlinjer, föreskrifter och vägledningar ombearbetning av enheter. • Handstycket levereras i icke-sterilt skick och behöver rekonditioneras före den första användningen och efter varje patient. • Var noga med att rengöra handstycket omedelbart (inom 30 minuter) efter användning för att avlägsna avlagringar. • Handstycket får inte tas bort från handstyckets sladd. • Produkten får inte rengöras med, sänkas ner i eller torkas av med elektrolyserat oxiderande vatten (mycket surt vatten, supersurt vatten), starka syror och starkt alkaliska medicinska vätskor, lösningar som innehåller klor, bensen eller thinner. • Rengör dem med ren och torr tryckluft. • Vid användning i en diskdesinfektor måste handstycket och sladden stabiliseras genom att placeras i en korg eller behållare. • Handstycket måste tas ut ur diskdesinfektorn omedelbart (inom 1 timme) efter rengörings- desinfektions- och torkcykeln har slutförts för att förhindra korrosion. • Torka produkten helt efter att diskdesinfektor har använts. Kvarvarande fukt orsakar korrosion på insidan, etc. • Autoklavera inte handstycket med andra instrument, även om det ligger i en påse. • Det är för att förhindra eventuell missfärgning och skada på produkten av kemiska rester på andra instrument. • Värm inte upp och kyl inte ner produkten för snabbt. Snabba förändringar i temperaturen kan skada produkten. • Ställ inte in steriliseringstemperaturen högre än 135 °C. • Kontakta sterilisatorns tillverkare för detaljerad information om cykeltemperaturer. • Rengör handstycket före desinficering. Om det finns blod kvar på den interna ytan kan det koagulera, och orsaka produkthaveri. • För rengöring och desinfektion ska du använda desinfektionsetanol eller desinfektionsisopropanol som inte innehåller några tillsatser (kallas hädanefter för desinfektionsalkohol). Användning av andra desinfektionsmedel än desinfektionsalkohol kan orsaka missfärgning eller sprickor. • Ta ut handstycket ur sterilisatorn direkt efter att steriliseringen har slutförts (inom 1 timme). Annars kan det orsaka korrosion. • För att säkerställa korrekt funktion och säker användning av den medicintekniska produkten ska regelbundna underhållskontroller utföras i enlighet med bruksanvisningen för det ultrasoniska systemet. • Ingen särskild utbildning krävs för denna enhet. • Referera den här bruksanvisningen för steriliseringsmetod. • Rengör inte handstycket i en ultrasonisk diskmaskin. • Handstycket är en förbrukningsvara. • Upprepad autoklavering kan missfärga handstycket på grund av värme. Detta beror på produktens egenskaper och är inte ett problem vad gäller kvalitet. • När produkten har rekonditionerats 250 gånger eller använts i ett år rekommenderas att auktoriserad NSK-personal utför en inspektion. • Produktens livslängd och funktionsförmåga avgörs huvudsakligen av mekaniska påfrestningar vid användning och konditioneringens kemiska påverkan. Om du upptäcker något ovanligt som värmealstring, vibrationer eller oljud, eller om den yttre märkningen (serie- eller modellnummer) har blivit oläslig före eller under användning, ska du sluta använda produkten omedelbart och be din närmsta NSK-återförsäljare, eller en NSK-filial, att inspektera den. • Meddela omgående alla allvarliga incidenter som uppstår i samband med produkten till tillverkaren och behörig nationell myndighet.



1




2

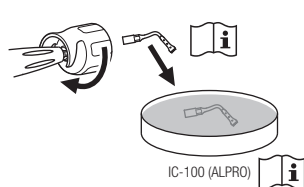


3




4

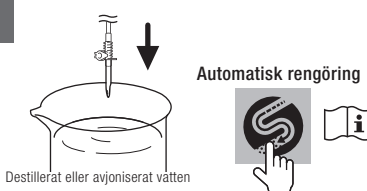


1

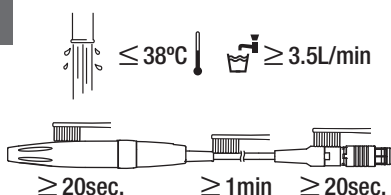


2

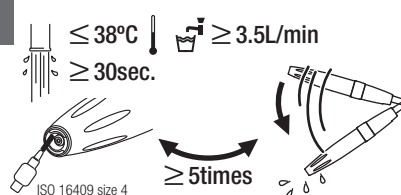


3

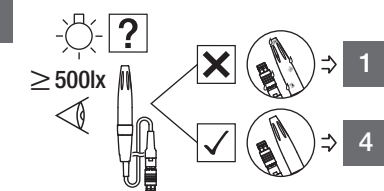


4

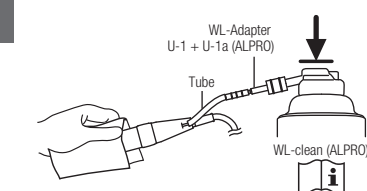

5

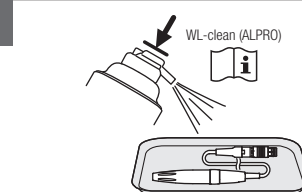


6

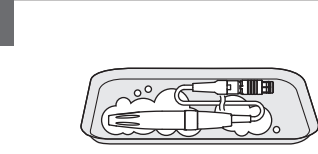


Vänta med att aktivera så länge som tillverkaren av rengöringsmedlet instruerar dig att göra det.




7

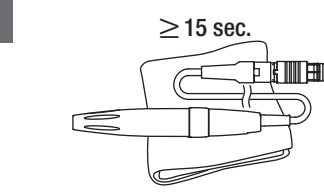




Använd lämplig desinfektionsalkohol i enlighet med de lokala föreskrifterna och riktlinjerna.

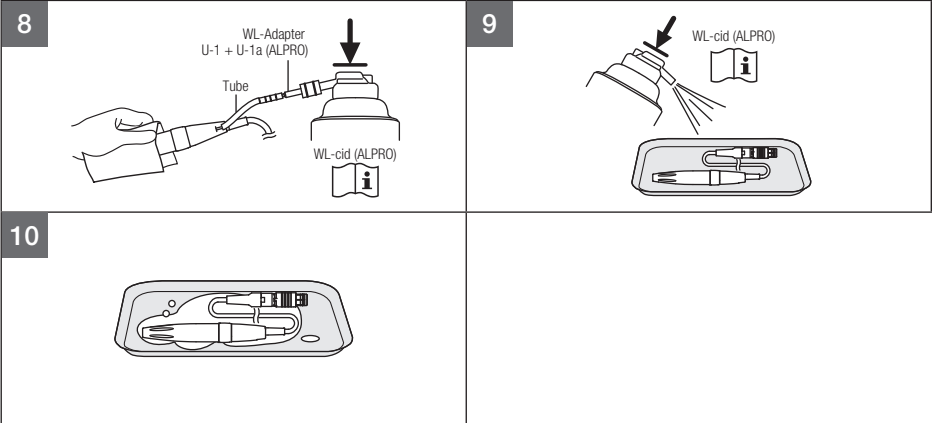

Vänta med att aktivera så länge som tillverkaren av rengöringsmedlet instruerar dig att göra det.

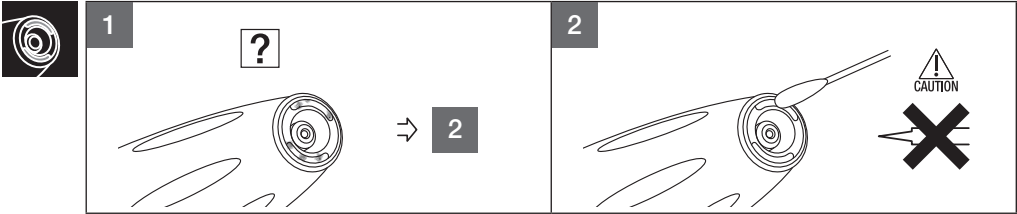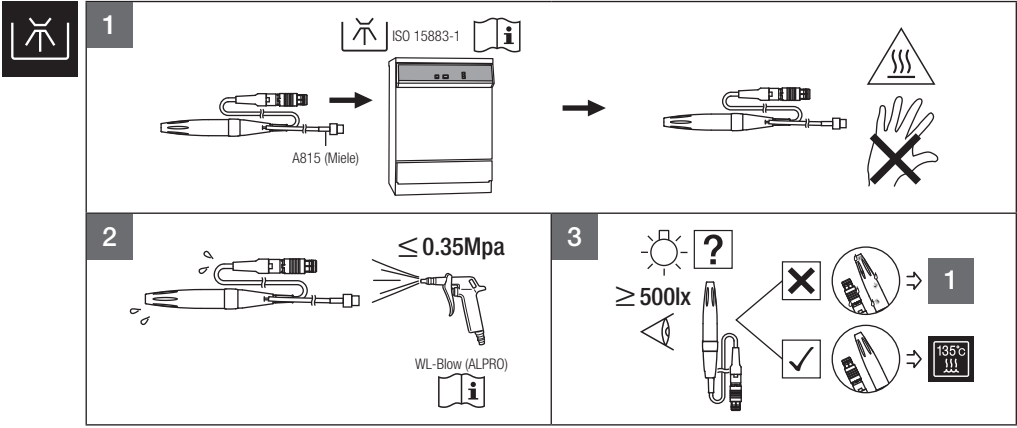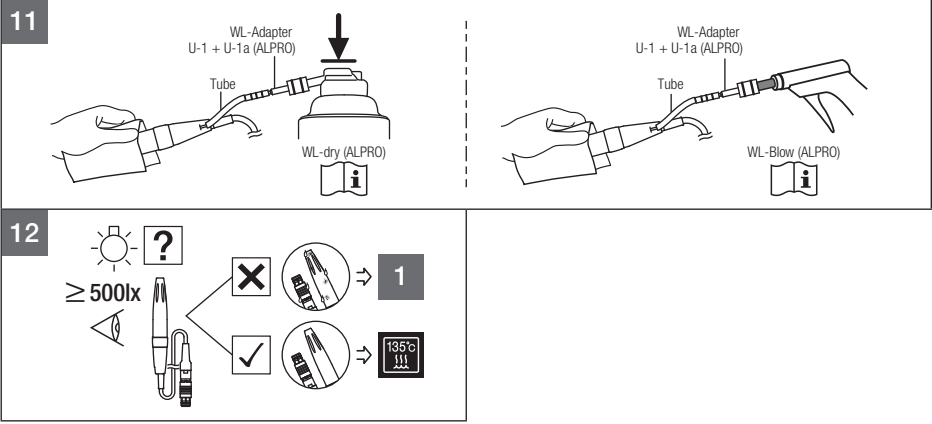

Använd lämplig desinfektionsalkohol i enlighet med de lokala föreskrifterna och riktlinjerna.

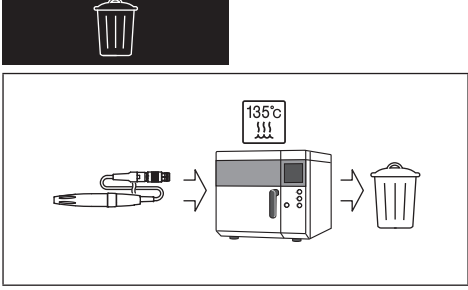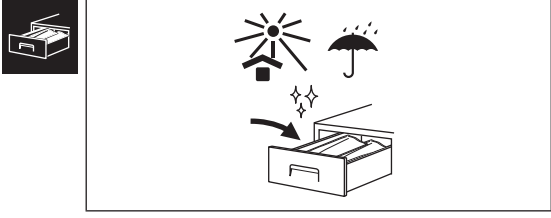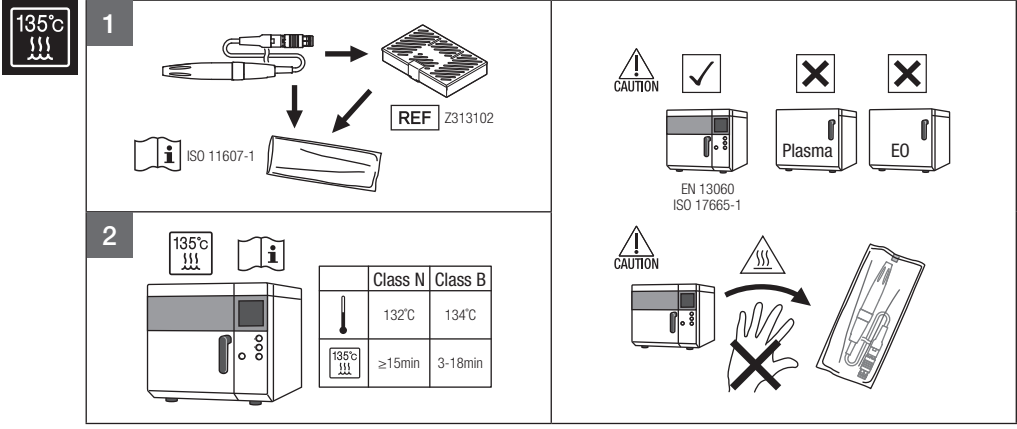

För att undvika eventuella hälsorisker för operatörer som hanterar avyttring av medicinsk utrustning, liksom riskerna för kontaminering av miljön av utrustningen, måste kirurgen eller tandläkaren bekräfta att utrustningen är steril. Be specialistföretag med behörighet att avyttra särskilt kontrollerat industriellt avfall att avyttra produkten åt dig.



* Undvik alla risker för att spolningslösningen ska frysa. Det finns risk för felfunktion när produkten används ovanför maxgränsen.

- 

WARNING! Fara som kan leda till allvarlig personskada eller skada på enheten om säkerhetsanvisningarna inte efterföljs på rätt sätt.
- 

FÖRSIKTIGHET! Fara som kan leda till lindrig eller måttlig personskada eller skada på enheten om säkerhetsanvisningarna inte efterföljs på rätt sätt.
- 

Förbjudet / åtgärden är INTE tillåten / felaktigt
- 

Utför steget / åtgärden är tillåten / korrekt
- 

Om ... (hypotetisk situation)
- 

Ultraljudsbad
- 

Denna produkt kan rengöras i diskdesinfektor.
- 

Denna produkt kan steriliseras i ångsterilisator vid 135 °C.
- 

Förflytta i angiven riktning.
- 

Förflytta i angiven riktning tills fullständigt stopp nås.
- 

Använd skyddshandskar
- 

Använd ansiktsmask
- 

Använd ögonskydd
- 

Lampa/belysning/upplysning
- 

Visuell kontroll
- 

Dricksvatten
- 

Temperatur
- 

Handdriven
- 

Försiktighet, varm yta
- 

Se bruksanvisningen
- 

Föremål med vassa kanter får inte användas.
- 

Tillverkningsdatum
- 

Tillverkare
- 

EU-direktivet 93/42/EEC tillämpades vid design och tillverkning av denna medicintekniska produkt.
- 

Auktoriserad representant i Europeiska gemenskapen
- 

Medicinteknisk produkt
- 

Katalognummer (Order cord)
- 

Serienummer
- 

Temperaturbegränsning
- 

Fuktighetsbegränsning
- 

Begränsning för atmosfäriskt tryck
- 

Användningsmiljö
- 

Transport- och förvaringsmiljö
- 

Skydda produkten från solljus
- 

Bräcklig/hanteras varsamt
- 

Håll produkten torr
- 

Specifikationer
- 

GS1 Datamatrix över unika enhetskännetecken.

	Modell	VS3-LED-HPSC
	Kabellängd	2m
	Typ av oscillering	Piezo
	Optisk	Vit LED
	Strömförbrukning (LED)	0.17 A (3.5 V)
	Mått	ø20×129mm (exklusive sladd)
	Vikt	70 g (utan sladd)

